



Cámara de
inhalación para todas
las edades

**Financiada por el
Sistema Nacional
de Salud**

Prochamber mejora
el depósito bronquial
de los inhaladores
reduciendo sus
efectos secundarios



Mejore su tratamiento inhalado

Instrucciones de uso de la Cámara de Inhalación Prochamber



 **KEYLAB**
Medical

PHILIPS
 **RESPIRONICS**

Prochamber le ayuda a administrarse su medicación inhalada

Siga las instrucciones de uso incluidas en la caja de la cámara y los pasos detallados a continuación:



1
Retire la tapa del inhalador y de la cámara. Compruebe que ningún objeto bloquee el interior de la cámara.



2
Inserte la boquilla de su inhalador en la parte posterior de la cámara Prochamber.



3
Si necesita utilizar mascarilla, ajústela en la boquilla de la cámara.



4
Agite 4 ó 5 veces la cámara Prochamber junto con el inhalador acoplado.



5
Introduzca la cámara en la boca y selle bien los labios alrededor de la boquilla. Expulse el aire de sus pulmones, dispense una dosis del medicamento, y a continuación inhale respirando profundamente.*



6
Contenga la respiración entre 8 y 10 segundos y exhale.



7
Si está usando mascarilla, mantenga ésta cubriendo la boca y la nariz. Dispense una dosis del medicamento a la cámara e inhale y exhale 6 respiraciones completas.*

* Si su médico le ha indicado que administre más de una dosis del medicamento, espere un minuto y repita los pasos del 5 al 7.

KL011-R1